


Tyylikkääät Cama Handi porrashissit

Kääntyviin portaisiin Cama Handi 6

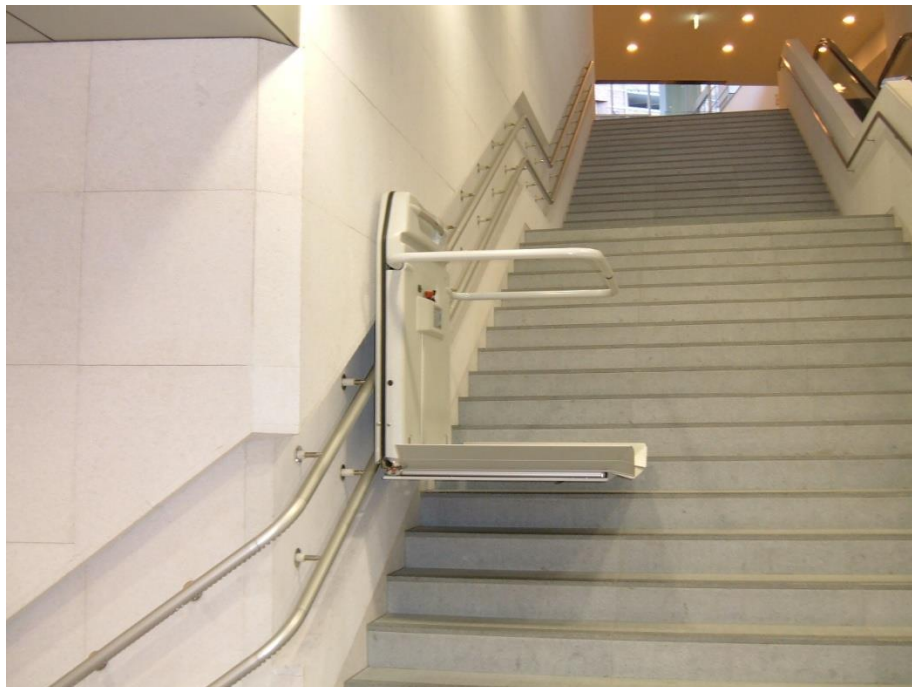

Suoriin portaisiin Cama Handi 7



Lavamallinen porrashissi pyörätuoli- ja rollaattorikäyttäjille

Valmistaja Cama Asp, Tanska

Cama Handi on helppokäyttöinen, toimintavarma ja hintalaatusuhteeltaan edullinen porraskaidehissi portaisiin.



Cama Handi on mitoiltaan siro ja tilasäästävä porrashissi. Luonnonvärisen alumiini yhdistettynä tyylikkääseen muotoiluun on tyylikäs kokonaisuus. Hissi soveltuu erinomaisesti pyörätuolikäyttäjille sekä julkisiin että yksityisiin kohteisiin.

Asennus voidaan suorittaa joko omalla tukirakenteella tolppa-asennuksena tai kantavaa seinää vasten. Kantavuus on 225 tai 300 kg riippuen kiinnitystavasta. Kun johde tulee omalla rakenteella, varustetaan johteen tausta turvapaneelilla.

Ajoyksikön ja lavan RAL värisävyn voi valita vapaasti RAL- värikartasta. Edullisin värisävy on RAL 7035.

Hissin nousukulma on oltava välillä 20 - 45 astetta

Käyttäjä ohjaa hissiä helppokäyttöisellä sauvaohjaimella tai avustaja spiraalikaapeliohjaimella (lisävaruste). Tasoilla on langattomat kutsu- ja lähetyspainikkeet.

Käynti hissilavalle voi tapahtua niin lyhyeltä kuin pitkältä sivulta riippuen kohteen tilasta. Ajoliuska on mahdollista pidentää max 270 mm.

Edullisimmat lavakoot ovat (pituus x leveys) 1000 x 800 tai 950 x 780 mm. Lavaleveyttä voi kaventaa 50 mm ja pituutta lyhentää/pidentää 100 mm jaksotuksin. Lavan maksimi pituus on 1250 mm.



Hissi kestää myös ulkokäytön edellyttäen talvikunnossapitoa

Rollaattorikäyttäjät on huomioitu omalla taittoistuimella ja liikkuvan hissin huomiovalo (lisävaruste) varoittaa muita kulkijoita.

Käytön mukaan toimivat hissin turvapuomit ja ajoliuska sulkeutuvat lähdetessä matkaan ja avautuvat saatuttaessa tasolle estäen pyörätuolin hallitsemattoman liikkeen matkan aikana.

Lisävarusteena saatavana turvapuomien ilkivaltasuojaus estää puomien vääntämisen rikki. Toiminnosta on hyötyä varsinkin julkisissa tiloissa.

Pysäköintitilassa hissi tulee ulos seinästä vain 290 mm



Rollaattorikäyttäjät on huomioitu omalla taittoistuimella ja liikkuvan hissin huomiovalo (lisävaruste) varoittaa muita kulkijoita.

Hissi toimii suorasähköllä 1 x 230 V, mikä tarkoittaa että hissiin ei tarvitse vaihtaa määräajoin kalliita akkuja.

Cama 7 voidaan varustaa ensinmäisen portaan eteen laskeutuvalla suoralla pystylaskulla. Toiminnosta on käyttäjälle merkittävää hyötyä varsinkin jos alatasolla on tilaa vain rajoitetusti.

CE-merkki, Konedirektiivi 2006/42/ EC, TÜV,BSI ja NS-normi

Lisätiedot
Hissiryhmä L&L Oy
Elotie 6
33470 YLÖJÄRVI
Puh 010 328 5500

Myyntipäällikkö Tuukka Tenhunen 050 569 3589
Toimitusjohtaja Lassi Tenhunen 045 133 9116